

Instructivo de uso del producto

HEMO SFIN
USO PROFESIONAL



HEMO SFIN

30 ML

CONTENIDO:
SULFATO FÉRRICO AL 15.5%
AGUA BIDESTILADA

CARACTERÍSTICAS

Hemosin solución de sulfato férrico al 15.5% sirve para el control rápido el sangrado y del fluido sulcular. El sulfato férrico es indicado para detener el sangrado capilar.

Detiene el sangrado en segundos proporciona insuperable suavidad hacia los tejidos duros y blandos elimina la contaminación por fluido crevicular para una decisión óptima.

Es utilizado también después de una extracción para contener el sangrado. Se aplica en la parte superior teniendo cuidado de no interferir con la coagulación del espacio dónde estaba el diente y no provocar un alveolo seco.

Hemosfin puede emplearse como alternativa al formocresol momificante en pulpotomías para detener el sangrado.

La diferencia con el cloruro de aluminio es que el sulfato férrico hace una hemostasia más profunda y el cloruro de aluminio hace una hemostasia leve aunado a eso que el sulfato férrico pigmenta los tejidos blandos y el cloruro de aluminio no lo pigmenta.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico:

Se aplica con un algodoncito sobre superficie sangrante



WWW.VICDENTMEXICO.COM

