

# Instructivo de uso del producto

HEMOSFIN CA  
USO PROFESIONAL



## CARACTERISTICAS

Hemosfin CA es un líquido hemostático a base de cloruro de aluminio recomendado para restauraciones de los dientes anteriores dado que elimina el sangrado sin dejar manchas.

Solución hemostática amortiguada para aplicación tópica sin epinefrina. Esta solución ayuda a controlar de una forma rápida el sangrado gingival antes de tomar una impresión o mientras se coloca una tira una cinta o una matriz cervical.

Hemosfin CA está indicada también para usar después de cirugías y limpiezas dentales.

Para mantener un área de trabajo limpia y seca es fundamental usar un agente hemostático gingival para controlar el sangrado. Hemosfin CA es una excelente opción que se puede colocar directamente sobre el tejido del paciente para evitar el sangrado.

Detiene sangrados leves, controla el fluido sulcular, no deja residuos ni provoca manchas. Se enjuaga fácilmente y es ideal para zonas estéticas relevantes.

El uso de Hemosfin CA con hilo retractor permite realizar retracción gingival inmediata y temporal para la toma de impresiones y ciertos actos quirúrgicos por su acción hemostática.

Detiene la hemorragia gingival por hemostasis de los capilares y la supuración de la mucosa.

## INSTRUCCIONES DE USO

Uso tópico:

Impregnar una torunda de algodón con el Hemosfin CA colocando en la zona a tratar dejando actuar por un minuto.

Uso con hilo retractor:

Impregnar un trozo de hilo retractor e introducirlo en el surco gingival lo que induce a la vasoconstricción de los capilares de la encía después de la toma de impresión debe hacerse un enjuague con agua suficiente.



[WWW.VICDENTMEXICO.COM](http://WWW.VICDENTMEXICO.COM)

